



clearcapsTM

German Technology
Speziell für Ihren Patienten gefertigt



Befreie dein Lächeln

Was ist ClearCaps

ClearCaps ist ein innovatives Konzept in der kieferorthopädischen Behandlung.

ClearCaps ist ein transparentes Alignersystem, das alle Vorteile der Metallzahnspangen bietet, aber unsichtbar, **vorhersagbar**, schmerzfrei, komfortabel und entfernbar ist.

Unsichtbar

ClearCaps sind transparente Aligner, die beim Tragen kaum erkennbar sind.

Schmerzfrei

Es vermeidet die typischen Schmerzen und Hygieneprobleme herkömmlicher Metallzahnspangen.

Komfortabel

Es bietet Flexibilität beim Tragen sowie saubere und frische Aligner.

Abnehmbar

Es lässt sich abnehmen, sodass eine vollständige Mundreinigung und Spülung möglich ist.



clearcaps™

Vorhersagbar

3D-Simulationssoftware ermöglicht eindeutige Ergebnisse, bevor die Behandlung beginnt.

- **ClearCaps** Die ClearCaps Portal-Software ist ein intuitives Werkzeug zur Bereitstellung eines Behandlungsplans.
- Das Portal bietet Unterstützung für die häufigsten kieferorthopädischen Bedürfnisse.
- Die intelligenten Werkzeuge ermöglichen es dem Zahnarzt, den Behandlungsplan und die Aligner-Einstellung auf einfache Weise
- Offene Software, die STL-Dateien akzeptiert und mit den meisten Intraoralscannern kompatibel ist.



clearcaps™

Advance features for IPR instructions:

- Reduktion der Zähne nach Bedarf im Labor
- IPR erforderlich (im Diagramm angeben)
- Keine IPR erforderlich

Angabe der IPR-Anweisungen

RX

Clicking on green plus sign to indicate IPR

Click tooth to provide specific instruction. Marker icon will appear on selected tooth

Anpassungen der Aligner-Einstellungen

Tooth Selection option for adjustment:

Please Move to Pre Treatment

- Reset Aligner
- Undo Extract Tooth
- Set Aligner Speed
- Set Attachments On

Zahnanpassungswerkzeuge

Intrusion - Extrusion

Distal - Mesial

Innen - Außen

Rotation Distal - Mesial

Tip Distal - Mesial

Torque Innen - Außen

Zubehörteile

Auswahl verschiedener Arten von Zubehörteile oder Anmerkungen für spezielle Sonderanfertigung ist möglich.

Platzieren Sie die Maus über den Zähnen, an denen Sie das Attachment hinzufügen möchten, und wählen Sie dann den Attachment-Typ aus der Bibliothek aus.



clearcaps™


ClearCaps kann die folgenden Fälle behandeln



Engstand



Offener Biss

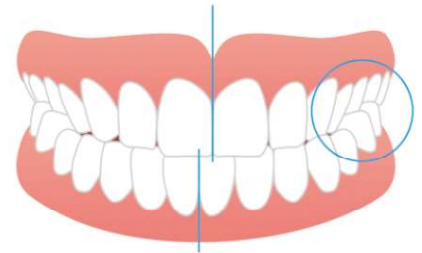


Mittellinienverschiebung



Tiefbiss





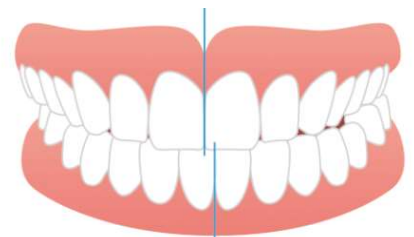

Lückenbildung




Kreuzbiss







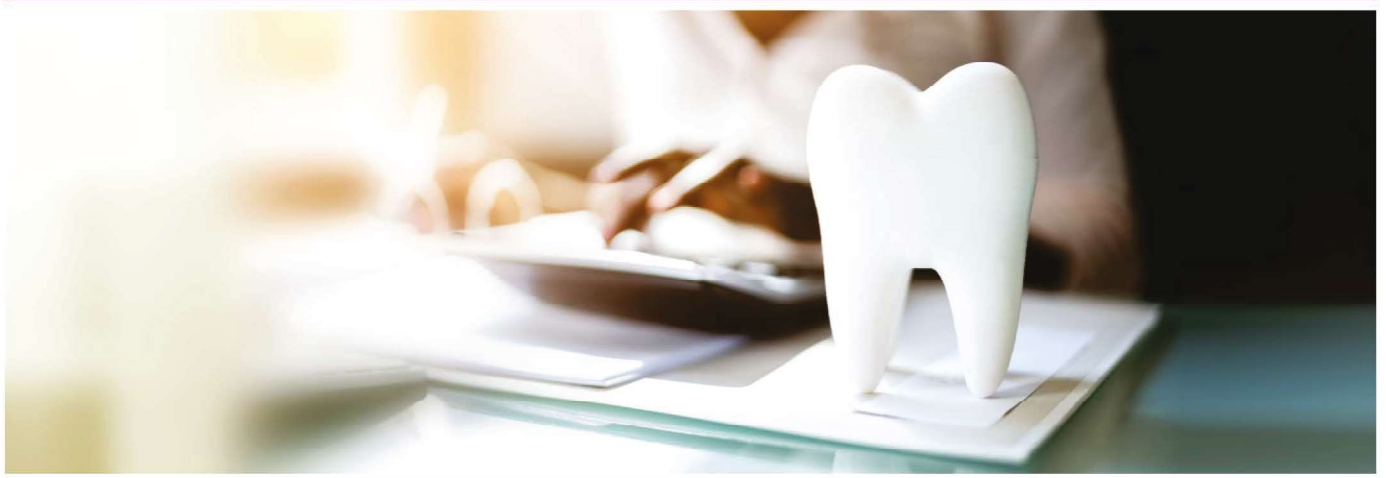

Support

-  Das professionelle Zahnarztteam von **ClearCaps** unterstützt Sie dabei, Ihre Patienten nahtlos und bequem zu betreuen.
-  Unser spezielles Team wird Sie bei Fallstudien unterstützen, indem es einen Behandlungsplan erstellt und die passenden Aligner für Ihren Fall auswählt.
-  Das ClearCaps-Team ist darauf spezialisiert, Sie über das ClearCaps-Webportal zu schulen
-  Das ClearCaps-Team ist immer nur einen Anruf entfernt, um Ihnen und Ihrem Patienten zu helfen.









Wie starten Sie mit uns ?

-  Erstellen Sie ein **ClearCaps**-Webportal-Konto.
-  Füllen Sie das Formular zur Patientendiagnose und den Behandlungsplan aus.
-  Laden Sie Röntgenbilder, intraorale und extraorale Fotos hoch.
-  Laden Sie die STL-Datei (Abdruck oder IOS) hoch.
-  Erhalten Sie einen vorläufigen Behandlungsplan mit der 3D-Simulation.
-  Überprüfen und genehmigen Sie den Behandlungsplan.



clearcaps™

Unsichtbar, vorhersagbar, schmerzfrei, Komfortabel und herausnehmbar

-  Vorhersagbare Ergebnisse mithilfe modernster Software.
-  Leicht mit Patienten zu besprechen durch 3D-Simulation.
-  Hygienisch.
-  Bequem für Reisende.
-  Weniger Nachsorgetermine und weniger Zeit im Behandlungsstuhl.
-  Verursacht keine Verlegenheit, unabhängig vom Alter oder Beruf.



clearcaps™



Befreie dein Lächeln



Homepage



Instagram

FÜR MEHR

CC Ortho Technology Manufacturing GmbH

Lankwitzer Str. 5, 12107 Berlin, Deutschland

Tel: +49 176 813 814 15
Email: hello@clearcaps.com
Homepage: www.clearcaps.com